


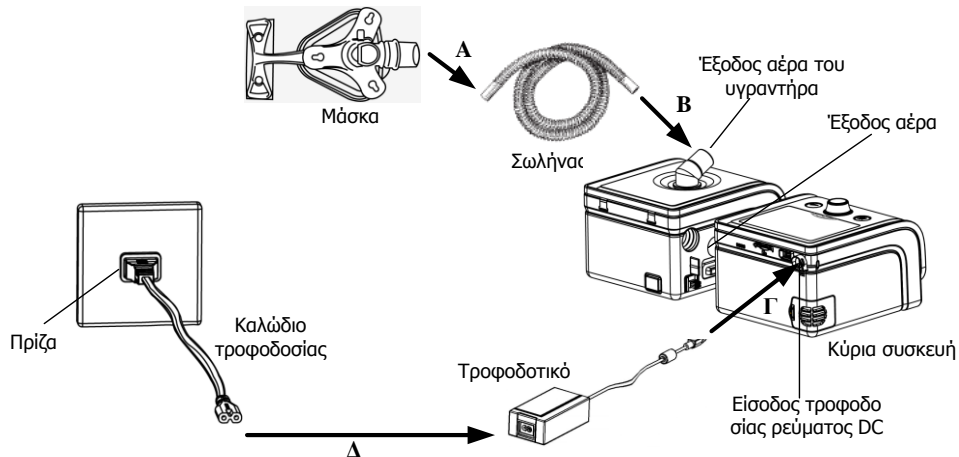


BRAP Σύστημα Σειρά Y / U Εγχειρίδιο γρήγορης λειτουργίας

1. Λειτουργίες κουμπιών

-  Κουμπί σίγασης: πατήστε αυτό το κουμπί για να σιγήσετε την ειδοποίηση
-  Επιλογέας: ξεκινήστε τη θεραπεία και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής
-  Κουμπί κλιμάκωσης: πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλιμάκωσης

2. Ρύθμιση της συσκευής




- A. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα με τη συναρμολογημένη μάσκα.
- B. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα, με ασφαλή τρόπο, με την έξοδο αέρα της κύριας συσκευής ή του υγραντήρα, όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.
- Γ. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος με την είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος DC της κύριας συσκευής.
- Δ. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με το τροφοδοτικό.
- Ε. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.


3. Προσαρμογή ρυθμίσεων συσκευής

A. Αφού συνδεθεί με το ρεύμα η συσκευή, στην οθόνη της εμφανίζεται το κύριο μενού που φαίνεται στο πρώτο σχήμα παρακάτω, ή το κύριο μενού που φαίνεται στο δεύτερο σχήμα παρακάτω, ή το κύριο μενού που φαίνεται στο τρίτο σχήμα παρακάτω, ή το κύριο μενού που φαίνεται στο τέταρτο σχήμα παρακάτω.


Σημείωση: την τιμή κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO_2) και τη συχνότητα παλμών μπορείτε να τα δείτε μόνο αφού έχει συνδεθεί σωστά το σύστημα SpO_2 με την κύρια συσκευή.

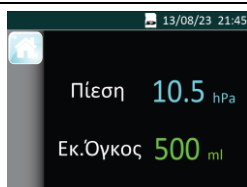


το παραπάνω περιβάλλον ισχύει μόνο για τα μοντέλα U-20T, U-25T, U-30T, U-30AT.

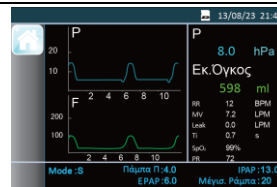


το παραπάνω περιβάλλον ισχύει μόνο για τα μοντέλα Y-20T, Y-25T, Y-30T, Y-30AT.

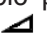
B. Από το κύριο μενού που φαίνεται παραπάνω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί κλιμάκωσης**  για τρία δευτερόλεπτα. Η οθόνη εμφανίζει το περιβάλλον της αρχικής ρύθμισης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

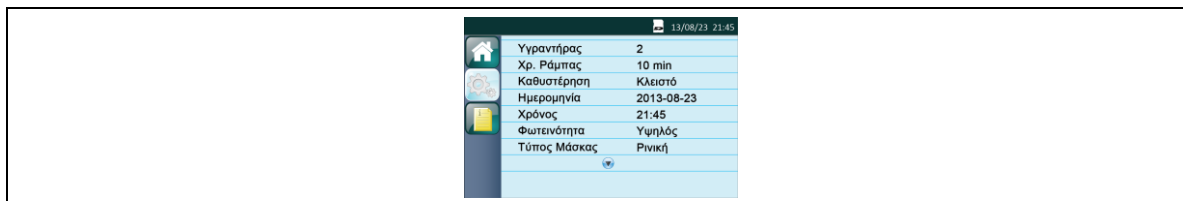


Γ. Πιέστε τον **Επιλογέας** για να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον εγκατάστασης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

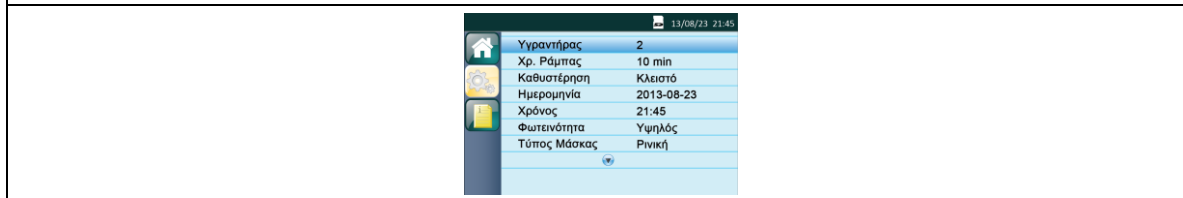


Δ. Πατήστε και γυρίστε τον **Επιλογέας** για να ρυθμίσετε μια επιλογή.

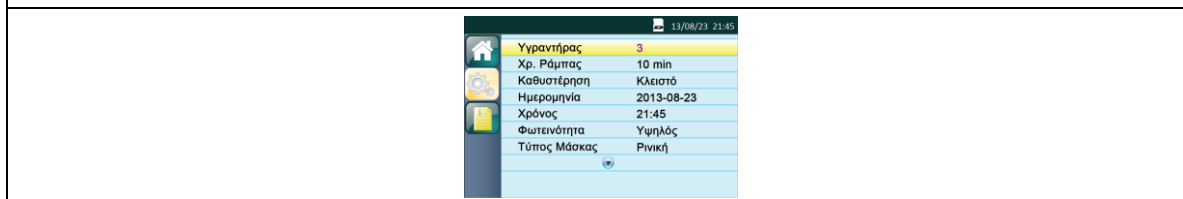

Ε. Πιέστε τον **Επιλογέας** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση που κάνατε στην επιλογή.

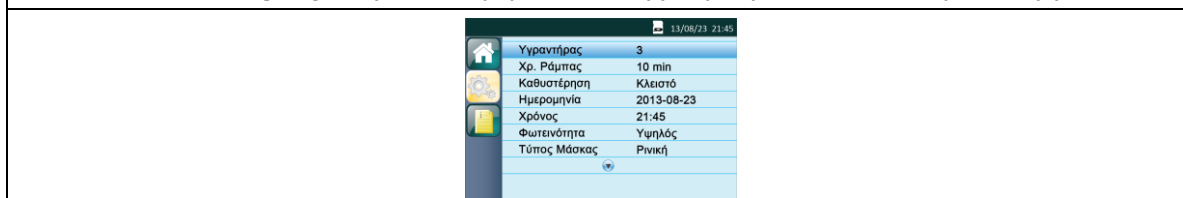

ΣΤ. Ο κέρσορας αλλάζει ανάμεσα στις επιλογές, καθώς περιστρέφετε τον **Επιλογέας**. Ανατρέξτε στα βήματα Γ-Ε για να ρυθμίσετε άλλες επιλογές. Όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην επιλογή «Αρχική» πιέστε τον **Επιλογέας** για να βγείτε από το περιβάλλον εγκατάστασης.

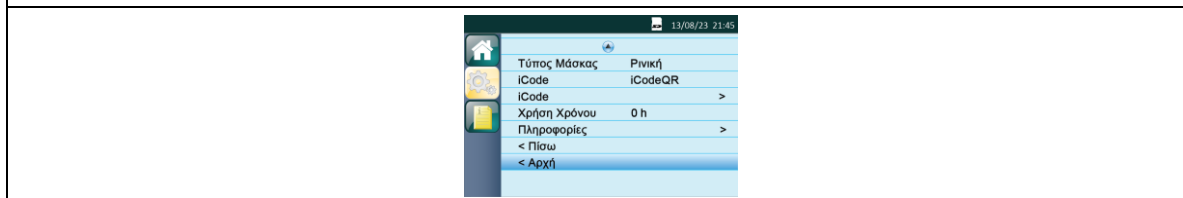

4. Έναρξη θεραπείας

Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής και επιστρέψετε στο κύριο περιβάλλον, πιέστε τον **Επιλογέας** για να ξεκινήσετε τη θεραπεία.

5. Σημαντικές συμβουλές

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση της συσκευής SpO₂ και της κάρτας SD.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη και απομνημονεύστε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής.